

Nachttische und Server

.bock<sup>®</sup>///



Sehr verehrter Kunde,

mit Ihrer Entscheidung zum Kauf dieses Produktes aus dem Hause Hermann Bock GmbH erhalten Sie ein langlebiges und modernes Produkt mit erstklassiger Funktionalität und Sicherheit.

Um mögliche Funktionsstörungen und Risiken für Personen, Anwender und Dritte zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen und die darin enthaltenen Anweisungen und Hinweise einzuhalten.

Ihr



Klaus Bock

#### **Bestimmungsgemäßer Zweck:**

- Die Nachttische und Server dienen zur Unterstützung der Pflege von gebrechlichen und pflegebedürftigen Menschen sowohl in Alten- und Pflegeheimen als auch in der häuslichen Pflege
- Die Nachttische und Server sind nicht für den Einsatz im Krankenhaus geeignet
- Die Nachttische und Server sind als Ablage und zur Unterstützung der Nahrungsaufnahme bestimmt und erleichtern die Arbeit der Pflegekräfte
- Die Nachttische und Server können unabhängig vom Pflegebett auf dem Boden positioniert und bewegt werden
- Bei vorhandener Höhenverstellbarkeit der Tischplatte kann diese auch über der Liegefläche des Pflegebettes verwendet werden
- Die Nachttische und Server können eigenständig von den pflegebedürftigen Personen genutzt werden
- Die Nachttische und Server dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden
- Die Nachttische und Server sind grundsätzlich für den mehrfachen Wiedereinsatz geeignet; Voraussetzung hierfür ist jedoch die Beachtung der Pflege- und Reinigungshinweise

#### **Gewährleistung**

Hermann Bock GmbH gibt auf die Nachttische und Server 24 Monate Gewährleistung. Beim Nichteinsatz von Original Bock-Ersatzteilen sowie bei der Durchführung von Instandsetzungen/Änderungen an den Nachttischen und Servern oder deren Komponenten durch nicht autorisiertes Personal erlischt jegliche Gewährleistung. Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der Pflegebetten.

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Beschädigungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

### **Pflege- und Reinigungshinweise:**

Die Tischplatten der Nachttische und Server bestehen aus beschichteten Dekorspanplatten. Je nach Modell wird dabei eine Melaminharzbeschichtung oder eine HPL-Beschichtung (Hochdruckschichtstoff) mit einem zusätzlichen Kantenschutz aus Kunststoff (ABS) verwendet. Die beschichteten Tischplatten sind anspruchlos und bedürfen wegen ihrer widerstandsfähigen und hygienisch dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Im Allgemeinen ist eine routinemäßige Reinigung bei Benutzung durch denselben Patienten hygienisch ausreichend. Eine Desinfektion der Nachttische und Server ist nur bei einer sichtbaren Kontamination mit (potentiell) infektiösem Material oder für die Wiederaufbereitung erforderlich.

Um die Gebrauchsfähigkeit der Nachttische und Server langfristig zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Pflege und Reinigung:

- Die Nachttische und Server sind nicht für die maschinelle Reinigung und Desinfektion geeignet und dürfen nur manuell gereinigt und desinfiziert werden
- Leichte Verschmutzungen können mit einem weichen, sauberen und ggf. leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden
- Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifen- / Waschmittellauge oder mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel entfernt werden
- Verbleibende Rückstände (bspw. auch Öl, Wachs...) können in den meisten Fällen mit organischen Lösemitteln (z.B. Aceton) entfernt werden
- Als Reinigungshilfsmittel dürfen grundsätzlich nur saubere weiche Tücher, Schwämme und Bürsten benutzt werden
- Möbelpolituren sowie fett- und wachshaltige Reinigungsmittel können die Struktur der Oberfläche verändern und dürfen nicht verwendet werden
- Reinigungsmittel, die starke Säuren, stark saure Salze oder schleifende, bzw. bleichende Bestandteile enthalten, dürfen nicht verwendet werden, da sie zu Beschädigungen des Materials führen können
- Feuchtigkeit (stehendes Wasser, feuchter Schwamm) führt insbesondere an den Stoßfugen zu Beschädigungen der Nachttische und Server und sollte unbedingt vermieden werden
- Hohe Temperaturen können zu Beschädigungen der Tischplatte führen, sodass für heiße Töpfe und Tassen immer ein Untersetzer verwendet werden sollte
- Das Schneiden auf Schichtstoff kann Kratzer verursachen und sollte vermieden werden
- Die Nachttische und Server können mit einer Wischdesinfektion desinfiziert werden; beachten Sie hierfür die geprüften und anerkannten Verfahren des Robert-Koch-Instituts (eine Auflistung der anerkannten handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie im Internet unter [www.rki.de](http://www.rki.de))

Zur Pflege und Reinigung weiterer Produkte und Materialien beachten Sie bitte die allgemeinen Herstellerangaben. Zusätzliche Hinweise zur Pflege und Reinigung sowie relevante Informationen finden Sie auch in den Montage- und Gebrauchsanleitungen der Hermann Bock Pflegebetten.



Hermann Bock GmbH  
Nickelstr. 12  
D-33415 Verl

Telefon: +49 (0) 52 46 92 05 -0  
Telefax: +49 (0) 52 46 92 05 -25  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)

#### Unsere VERTRIEBSPARTNER

Unsere Geschäftspartner setzen, wie wir selbst, auf Qualität, Innovation und überdurchschnittliche Standards, die international anerkannt sind. Wir können uns auf unsere Partner ebenso gut verlassen, wie Sie sich auf uns. Beachten Sie bitte, dass nur durch unser autorisiertes Personal und unsere Vertriebspartner, Schulungen, Ersatzteilversorgung, Reparaturen, Inspektionen und sonstiger Service gewährleistet werden kann. Ansonsten gehen sämtliche Garantieansprüche verloren.

Eine Auflistung unserer aktuellen Vertriebspartner finden Sie unter [www.bock.net/kontakt/vertriebspartner](http://www.bock.net/kontakt/vertriebspartner)