







Komfort auf ganzer Linie: das bock practico alu plus

Das practico alu plus ist ein funktionales Niedrigbett, das Pflegekräfte unterstützt, bedarfsgerecht und individuell zu pflegen. Die Höhenverstellbarkeit von 25 bis 80 cm ermöglicht Pflegenden in jeder Pflegesituation kinästhetisch zu arbeiten. So wird die Mobilisierung des Bewohners und die Pflege am Bett durch die individuell einstellbare Höhe deutlich erleichtert.

Ergonomischer Komfort

Auch für den Bewohner ist das practico alu plus äußerst ergonomisch und komfortabel. Der Matratzenausgleich in Kombination mit der langen Rückenlehne vermindern Druckspitzen und sorgen so für physiologische, bequeme Sitz- und Liegepositionen. Für mehr Flexibilität im Pflegealltag, ist das practico alu plus um 10 oder 20 cm werkzeuglos verlängerbar. Die Pflegekraft kann in wenigen Sekunden die Bettlänge individuell nach der Körpergröße des Bewohners anpassen.

Möchte der Bewohner das Bett verlassen, kann er mit dem leicht bedienbaren Handschalter das practico alu plus in seine persönliche Wunschhöhe verfahren.

Flexibel auch in der Ausstattung:

Das practico alu plus lässt sich mit zwei verschiedenen Seitensicherungssystemen ausstatten. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen SR1 und SR3. Mehr auf Seite 10.

practico alu plus: Alle Vorteile im Überblick














Ergonomisch optimiert: die Liegefläche


Das practico alu plus erfüllt mit seiner Liegefläche einen klar definierten Qualitätsanspruch für die institutionelle Pflege: komfortables und ergonomisch optimiertes Liegen.

- ① Die 4-geteilte Liegefläche bietet eine ergonomische Rückenlehne und einen Matratzenausgleich, die für eine bequeme und physiologisch sinnvolle Sitzposition sorgen und Druckspitzen vermindern. Der Längenausgleich der Rückenlehne beträgt 13,5 cm (Matratzenausgleich)
- ① Vielfältige Sitz- und Liegeeinstellungen sowie Liegeflächensysteme bieten erhöhten individuellen Liege-Komfort
- ① Integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungsverlängerung (bei SR3) für eine einfache und schnelle Anpassung an die Körpergröße des Bewohners
- ① Diverse Verstellmöglichkeiten wie Trendelenburg, Anti-Trendelenburg und Komfort-Sitzposition sind mit einem Knopf anwählbar






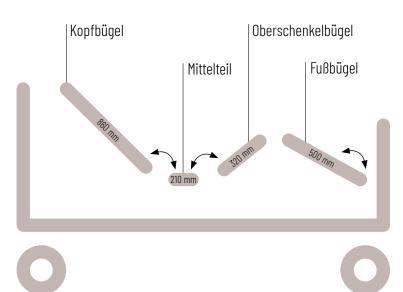

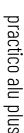

practico alu plus

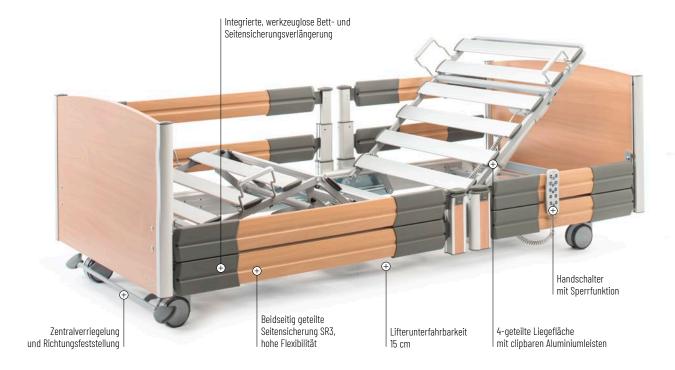

Mehr Informationen www.bock.net

practico alu plus	
Maße	
Außenmaß	102 × 208,5 cm
Liegefläche	90 × 200 cm
Sondermaße	Breite 100, 105, 110 cm Länge 210 cm integriert bis 220 cm
Höhenverstellung	25-80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm
Gewichte	
Bettgewicht	ca. 135 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg
Seitensicherungen	
Systeme	SR1 oder SR3 (siehe Seite 10)
Unterteilung	durchgehend, lang geteilt, kurz geteilt (nur bei SR3), kopfseitig, ohne Sicherung
Höhe*: - Mit Federholzleisten - Mit ripolux® neo	39,5 cm 35 cm
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	20, 21 und 22
Motor	

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose, Optional: CPR-Notabsenkung

*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung bei SR3



Produktspezifikationen, Endstücke und Zubehör finden Sie ab Seite 11.

Kostenreduktion integriert: Bettverlängerung als Standard

Das practico alu plus ist mit einer integrierten, werkzeuglosen Bettverlängerung ausgestattet. Die Liegefläche kann um 10 oder 20 cm verlängert werden. Bei einer Ausstattung mit der Seitensicherung SR3 verlängert sich die Seitensicherung automatisch mit. Insbesondere groß gewachsene Bewohner ab einer Körpergröße von 180 cm genießen den ergonomischen Komfort und Pflegeprofis arbeiten maximal flexibel, ohne das Bett zeit- und kostenintensiv umzurüsten. Einfach verlängern – fertig.

- Ein besonderes Komfort-Highlight für Bewohner ist die Liegeflächenverlängerung: Der Bügel zur Verlängerung wird bei Verstellung der Liegefläche automatisch mitgeführt, so dass die Unterschenkel und Füße zu jedem Zeitpunkt bequem aufliegen.
- ① Pflegende können schnell und mit wenigen Handgriffen die Bettlänge an unterschiedliche Bewohnerprofile und Pflegesituationen anpassen.

Optional kann für jedes Bett das Verlängerungsset einfach mitbestellt werden. Set bestehend aus:

- Bügel zur Verlängerung der Liegefläche
- Zwei Aluminiumstücke zum Verlängern der Seitenblenden





Individuell konfigurierbar: nach Wunsch unterfedert

اْماتاً،

Federholzleisten mit Zonenverstärkung



Die Grundvariante.

Die bewährten Federholzleisten mit Zonenverstärkung gibt es bei bock bereits in der Standardausstattung. Die Zonenverstärkung im Gesäßbereich sorgt für einen hohen Komfort, insbesondere auch in sitzender Position. Die Federholzleisten sind in flexiblen und langlebigen Kautschuk-Halterungen gesichert. Dadurch wird bei Bedarf ein einfacher Austausch ermöglicht.

Vorteile für den Bewohner:

⊕ Komfortabel und ergonomisch

Vorteile für die Pflegekraft:

Pflegeleicht und langlebig

Liegefläche mit Aluminiumleisten



Mit clipbaren Aluminiumleisten.

Die moderne Liegefläche ermöglicht durch die einzeln herausnehmbaren Aluminiumleisten eine schnelle und individuelle Druckentlastung. Die stabilen Leisten sind einfach zu entfernen, zu reinigen und wieder einzusetzen. Eine Umrüstung zum ripolux® neo-System ist bei dieser Liegefläche durch Drehung der Aluminiumleisten und Zukauf der einzelnen Federn jederzeit möglich.

Vorteile für den Bewohner:

 Herausnehmbare Aluminiumleisten für individuelle Druckentlastung

Vorteile für die Pflegekraft:

- (+) Besonders leichtes Material
- Stabile Aluminiumleisten, langlebig und abwaschbar

ripolux® neo



Ein Unterfederungssystem - perfekt für alle.


Das flexible Unterfederungssystem ripolux® neo passt sich genau der Druckverteilung des Körpers an, für eine bequeme, ergonomische Lagerung in allen Sitz- und Liegepositionen.

Vorteile für den Bewohner:

- Federn in 2 verschiedenen Härtegraden für individuellen Liegekomfort. Auf Anfrage ist eine Weiche erhältlich
- ① Druckausgleich dank unabhängiger und punktgenauer Federwege

Vorteile für die Pflegekraft:

- Werkzeuglose und individuelle Liegeflächen-Konfiguration
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme und ideale
 Unterlüftung

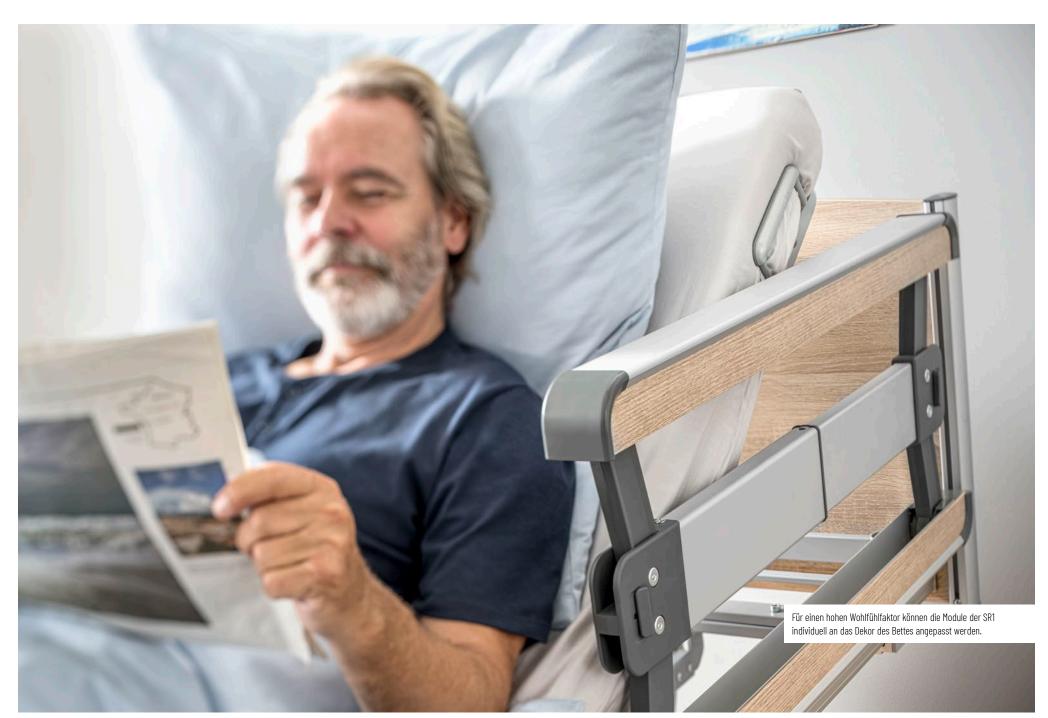

Individuell konfigurierbar: 2 Seitensicherungen

SR1




- ① Sanfte und leichte Handhabung
- ① Hohe Flexibilität durch drei verschiedene Längen
- Rückwärtskompatibel mit einigen Bettenmodellen
- ⊕ Kompakte Bauhöhe
- ① Optimale Haptik
- ① Dezentes und gradliniges Design
- ⊕ Vollständige Umsetzung der Norm DIN EN 60601-2-52





SR3

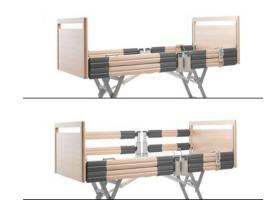

- (+) Hohe Variantenvielfalt und verschiedene Dekore
- ① Integrierte Verlängerung der Seitensicherungen möglich
- Seit Jahren bewährt
- ① Holme im Holzdekor für wohnliche Atmosphäre
- ① Optional in der untersten Position verriegelbar
- ⊕ Vollständige Umsetzung der Norm DIN EN 60601-2-52







Für eine individuelle und situationsgerechte Bettausstattung.

Aufrichter





Aufrichter Handgriff

Art.-Nr. 92228 A001



Aufstehhilfe

Art.-Nr. auf Anfrage

Leuchten



LED-Bettleuchte Modell G

Anschluss an Steuerbox, bedienbar per Handschalter Art.-Nr. 100.04164



LED-Bettleuchte Modell E

mit externem Steckernetzteil und Kippschalter Art.-Nr. 207.00196



Unterbettleuchte

Anschluss an Steuerbox, bedienbar per Handschalter Art.-Nr. auf Anfrage

Universalhalter



Universalklemme

Drainagesackhalter Art.-Nr. 890.02299



Universalklemme

Urinflaschenhalter Art.-Nr. 890.02298



Kabelhalter

Art.-Nr. 910.08886

Infusionshalter



Infusionshalter (fix)

Art.-Nr. 890.02301



Infusionshalter (höhenverstellbar)

Art.-Nr. 890.02302



Infusionshalter

für Aufrichter

Art.-Nr. 890.02300



Für eine individuelle und situationsgerechte Bettausstattung.

Abstandhalter



Wandabstandshalter mit Rolle für Endstücke Typ 21 und 22 Länge: 500 mm



Wandabstandshalter mit Stopfen Länge: 500 mm

Bettverlängerung



Set bestehend aus:

- Bügel zur Verlängerung der Liegefläche
- Zwei Aluminiumstücke zum Verlängern der Seitenblenden

Art.-Nr. 404



Matratzenverlängerung

Länge: 200 mm Art.-Nr. auf Anfrage

Sonstige



Transportwagen Art.-Nr. 100.04161



Aluminium-Rollenverkleidung Art.-Nr. auf Anfrage



Beleuchteter Handschalter





Schwesternpanel

Art.-Nr. auf Anfrage



Akku Akku zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, z. B. bei Stromausfall Art.-Nr. auf Anfrage

mechanische Schock-Not-Absenkung Art.-Nr. auf Anfrage

Endstücke



Typ 20

- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
- Handlauf für mehr Sicherheit
- Praktischer Bettdeckenschlitz



Typ 22

- Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
- Seitl. abgerundete Aluminiumprofile



Typ 21

- Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
- Seitl. abgerundete Aluminiumprofile
- Geschwungener Griffbügel: Stahl pulverbeschichtet



Bettzeugablage

für Bettbreite 90 cm Art.-Nr. auf Anfrage

Dekore

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht Objekteinrichtungen von bock unvergleichlich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten wir Ihnen eine qualitativ hochwertige Möblierung, die Funktionalität mit Komfort verbindet. Alles kann nachträglich auf- und umgerüstet werden. Die Elemente können entsprechend angepasst werden. bock Pflegebetten und Möbel können Sie außerdem mit Zusatzfunktionen und optionalem Zubehör ausstatten. So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexibel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Basis-Dekor



Buche gedämpft

Holz-Dekore







Madison Walnut



ut Ahorn After Eight



Königsahorn



Sonoma Eiche



Buche Blume

Sonder-Dekor



Weiß

practico alu plus: die Vorteile auf einen Blick





Für Bewohner:

- ① Ergonomische Rückenlehne und Matratzenausgleich sorgen für eine bequeme und physiologische Sitzposition
- \oplus Sicheres Liegen bei der niedrigsten Höhe von nur 25 cm
- ① Drei verschiedene Liegeflächensysteme für individuellen
- \oplus Vielfältige Sitz- und Liegeeinstellungen, u. a. Komfort-Sitzposition

Für Pflegekräfte:

- ① Optimale Arbeitshöhe von 80 cm
- ① Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung auf 210 und 220 cm
- Große Doppellenkrollen mit Zentralverriegelung und Richtungsfeststeller für einfaches Manövrieren und Arretieren
- ① Optional mit Bettzeugablage





eingetragenes Warenzeichen
 Bestellnr.: 890.02482
 Stand: 12 | 2021
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Bildnachweise: Nicola Rehage, Gütersloh







Hermann Bock GmbH Nickelstraße 12 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 (0) 5246 9205 0
Telefax: +49 (0) 5246 9205 25

Internet: www.bock.net E-Mail: info@bock.net